

## ELEKTROKARDİYOĞRAFI (EKG) CİHAZI KULLANMA TALİMATI

**1.AMAÇ:** Cihazlardan elde edilen sonuçların doğruluğunu tespit etmek, cihazın doğru kullanımını sağlamak.


**2.KAPSAM:** ..... ASM'de kullanılan elektrokardiyografi cihazını kapsar.

### 3.SORUMLULAR:

- Aile Hekimi
- Aile Sağlığı Elemanı
- 

### 4.UYGULAMA:

- Cihazın güç kablosu topraklı prize takılır.
- EKG çekimi yapılacak hasta bilgilendirilir.
- Hasta sırt üstü yatırılır üzerindeki madeni eşyalar uzaklaştırılır (küpe, yüzük, saat vb).
- Elektrotlar aşağıdaki şekilde bağlanır:

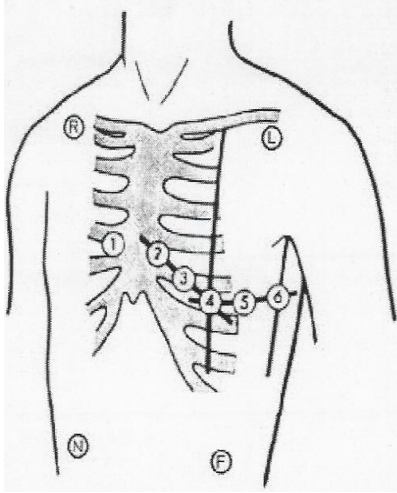

R (RA), Kırmızı, Sağ Kol  
L (LA), Sarı, Sol Kol  
F (LL), Yeşil, Sol Bacak  
N (RL), Siyah, Sağ Bacak  
C1, Kırmızı, 4'üncü interkostal boşluğundan göğüs kemiğinin sağına doğru,  
C2, Sarı, 4'üncü interkostal boşluğundan göğüs kemiğinin soluna doğru,  
C3, Yeşil, C2 ve C4 ün arasında, 5. Kosta kemiği  
C4, Kahverengi, 5. Interkostal boşluğu, sol köprücük kemiğinin altındaki orta çizgi,  
C5, Siyah, C4 ile aynı seviyede, ön koltukaltı çizgisi  
C6, Mor, C4 ile aynı seviyede, orta koltukaltı çizgisi.

- Cihazın açma/kapama anahtarı açılır.
- Uygun mod seçilir, start düğmesine basılarak çekim yapılır.
- İşlem bittiğinde elektrotlar hastadan sökülür.
- EKG kabloları dairesel olarak toplanır.
- Cihazı açma/kapama anahtarından kapatılır.
- EKG cihazı kullanıma hazır durumda bırakılır.
- Günlük olarak, sarj olup olmadığı açıp kapatılarak batarya göstergesinden kontrol edilir.